

Colostomie 1-delig
Doorspoelbaar CE



instructies

Verwijderen • Aanbrengen • Doorspoelen

Vrijheid: Doorspoelen of weggoien?



Vorbereiden:

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en uw stomamateriaal. Verwarm het stomamateriaal door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.




Verwijderen en schoonmaken:

Verwijder het stomazakje door de huid los te duwen van de huidplaat en deze te ondersteunen.



Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze droog.

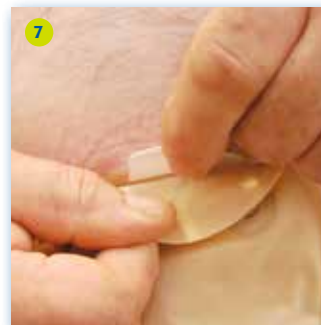

Aan u de keuze:
Doorspoelen of weggoien!
Indien doorspoelen, eerst scheiden. Vouw de voorkant van het buitenzakje weg en pak vervolgens eerst het witte lipje.



Houd hierna de huidplaat tegen op de huid en trek vervolgens het buitenzakje van boven naar beneden.



Verwijder het binnenzakje door de huid los te duwen van de huidplaat en deze te ondersteunen. Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze droog.



Vouw de huidplaat om vanaf de onderste rand van de opening. Strek met de vlakke hand de huid boven de stoma en plaats de huidplaat onder de stoma op de huid.



Vouw vervolgens de huidplaat over de stoma op de huid en houd hierbij de huid gestrekt.



Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.



Doorspoelen:
Leg het volle binnenzakje in het toilet met de huidplaat naar boven. Spoel vervolgens door.
Let op: De huidplaat niet dubbelvouwen!